



ラベルスペース




SENDAI SPORTS

EVA 熱成型インソール

3D insoles

小学生用インソール

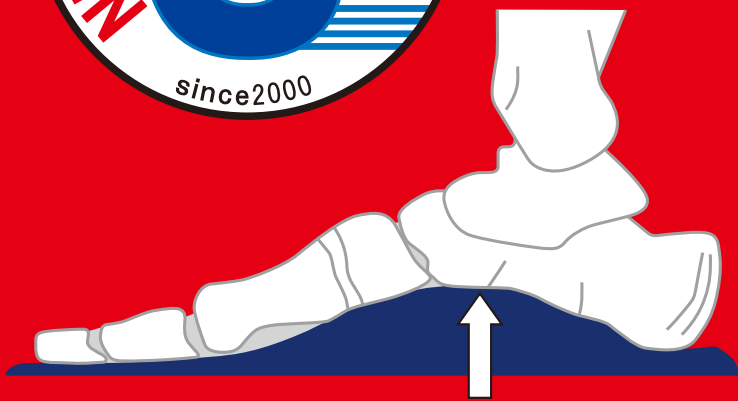

理想の形 3つのアーチで足を守る

<http://www.sendai-sports.net/>



小学生用インソールは、理想的な形のアーチが有り、インソールに乗ることによって足も理想的な形になっていく矯正インソールです。



フラットインステップインソール



青柳 力 (あおやぎ りき)

株式会社あおやぎ接骨院グループ 代表
あおやぎ接骨院グループ総院長
フィットネススタジオ スポーツプラス代表

- 柔道整復師
- プロスポーツトレーナー

【経歴】

フィンランド柔道ナショナルチームコーチ
各種プロスポーツメディカルトレーナー
女子ラグビー日本代表 帯同
全日本トライアスロン 帯同
全国高校野球選手権大会 帯同
箱根駅伝 帯同
スキークロス日本代表 龍澤宏臣選手 仏W杯帯同
ボルダリング日本代表 三浦絵里奈選手 日本W杯帯同
2015年～現在 夏・冬宮城県国体チーム帯同
その他：古川工業高校、古川黎明高校、
古川学園などの地域のスポーツ団体に
メディカルトレーナーとして帯同

私がインソールを勧める理由

足を正常な状態に改善する「インソール」
仙台スポーツさんのインソールは、様々な足のトラブルに対応し、身体のバランスを整えてくれます。スポーツ選手だけでなく、幅広い年齢の方々にも是非、使用してもらいたいですね！


子供の時からインソールで健康な足を守る

インソール プロショップ 仙台スポーツ有限公司

宮城県仙台市宮城野区岩切洞ノ口 229-6
TEL 022-396-2822 FAX 022-396-2823

MADE IN CHINA

こんな悩みはありませんか？

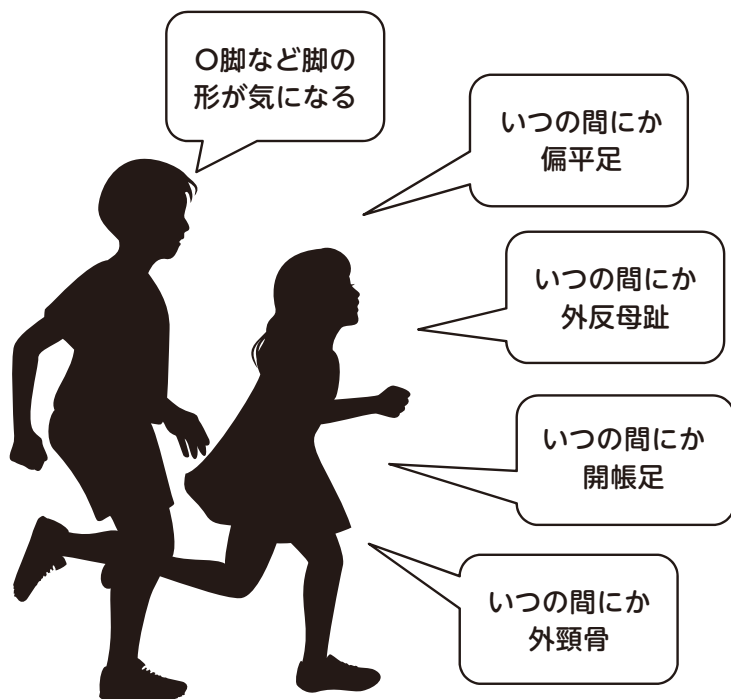

<使用上の注意>

- 汚れた場合は、石けん水で洗い、陰干しして下さい。
- 熱成型で加工されています。高温（60℃以上）の場所に放置しないでください。変形する恐れがあります。
- 規定のインソールサイズに基づき使用してください。
- 痛み・違和感を感じた場合は、すぐに使用を中止し、仙台スポーツまでご連絡ください。
- 極端にかかとの浅いシューズには、合わない場合があります。シューズを確認してください。

インソールのカット方法

①元々入っているインソールは、ノリでシューズに接着してありますので、慎重に剥がし取り外してください。

※無理に取り外そうとするとシューズが痛む場合があります。



②インソールを合わせたら、左右のバランスをしっかりと確認の上、センターに合わせて、ボールペンで線を引きます。

※カットの際は、必ずはさみを使用してください。



③シューズへのセットは、つま先から入れ、かかとを押し込むようにセットします。シューズにぴったり納まったら、セット完了です。

※シューズとかかとの隙間がある場合は、かかと側に引き戻してください。



ご購入誠にありがとうございます。仙台スポーツでは、

- ①小学生インソール
- ②ジュニアインソール
- ③シリコンインソール
- ④スポーツインソール
- ⑤メディカルインソール
- ⑥ハイヒールインソール

など様々なインソールを設計・企画・製作を行っております。